

ウォッシャーディスインフェクター

ARNO

アルノ


ISO 15883 準拠

販売名 ウォッシャーディスインフェクター アルノ
 クラス分類 医療機器クラス I (器具除染用洗浄器)
 医療機器届出番号 13B2X10166000017
 本体定価 ¥1,904,000- (税別)
 本体重量 65kg
 外形寸法 W595mm - D520mm - H600mm
 (扉開時最大: D855mm)
 洗浄槽 W428mm - D415mm - H370mm
 一次側設備 電源 単相 200V 20A
 給水・給湯 排水 VP40A (事前冷却機能あり)
 RO 接続可 (オプション)



合計40通りのプログラムをカスタマイズ可能

プログラム例	予備洗浄 温度 時間	洗浄 温度 時間	すすぎ 温度 時間	熱水消毒 温度 時間	乾燥 温度 時間
クイックプログラム (約45分)	55°C 300秒	- 60秒	- 300秒	90°C 300秒	125°C 600秒
スタンダードプログラム (約60分)	55°C 120秒	60°C 600秒	120秒	90°C 300秒	125°C 1200秒
強力洗浄プログラム (約75分)	60°C 120秒	60°C 600秒	180秒	90°C 300秒	125°C 1440秒

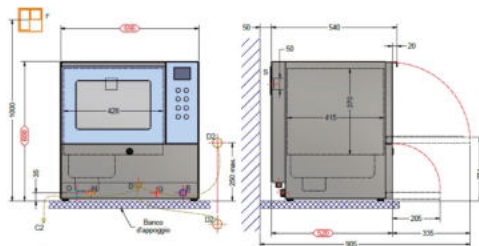

アルノ WD 用洗剤 (中性酵素)
 5L×2本入 / 箱



- 薬品二重ガラス
- ステンレススチールのデザイン
- 人間工学に基づいたハンドル
- ドアロック安全システム
- リアルタイム水圧検知による確実な洗浄
- カラーグラフィックディスプレイを備えたタッチコントロールパネル
- 警報チェックシステム
- カスタマイズ可能なプログラム
- マルチカラーLEDライト
- プログラムを記録するプリンター接続可能
- フィルター掃除センサー
- 安全で効率的なヒーター内蔵
- 洗剤補充アラート
- 自動洗剤注入・管理
- 正常動作監視システム
- HEPA H14フィルターによる乾燥
- RS232ポート接続
- USBポート接続

メンテナンスサービスネットワーク

日本全国どこへでも設置・修理・メンテナンスをサポートいたします



【販売元】
 株式会社モレーンコーポレーション
 東京都中野区東中野5-1-1 ユニゾンモール3F
 TEL: 03-5336-3911
 Mail: dental@moraine.co.jp
 HP: https://www.moraine.co.jp/



最短 45 分間で洗浄・熱水消毒・乾燥 40通りのカスタマイズプログラム

「ウォッシャーディスインフェクター ARNO」はタンパク質および汚染の除去を目的として
洗浄、すすぎ、熱水消毒、乾燥を自動で行う医療機器です
コンパクトでありながら十分な処理能力を持ち
ビルトイン・テーブルトップどちらにも設置可能です
作業スタッフの感染リスクを低減し、作業時間とランニングコストの節約に貢献します
現代の歯科領域のスタンダードを、「ARNO」が実現します



内部の配置は自由自在
歯科器材に最適なアクセサリを
豊富にラインナップ



A063 トレイ / カセット立て



A064 縦収納用バスケット



A071 プライヤー用ラック



A086 内腔洗浄用ダクト



A068 印象トレー用ラック



A073 蓋付バスケット



A082 バスケット 1/2



A141 ダクトコネクター



洗浄プログラム

合計 40 通りの洗浄プログラム
標準洗浄プログラム 3 通り
カスタムプログラム 37 通りを作成可能
＜プログラム例＞
・クイックプログラム (工程時間 約 45 分)
・スタンダードプログラム (工程時間 約 60 分)
・強力洗浄プログラム (工程時間 約 75 分)

熱水消毒

国際規格 ISO 15883 準拠
Ao 値 3000 以上の熱水消毒を実現し、
(93°C/2.5 分、90°C/5 分 など)
芽胞を除く病原微生物を消毒します
※ ISO 15883 では手術器械に Ao 値 600 を
適用すること、また手術器械に用いるウォッシャー
ディスインフェクターの性能に Ao 値 3000 以上を
達成できることを求めています

乾燥

ハンドピース等の内腔器材にも対応
※別途アクセサリが必要です
乾燥温度・時間のカスタマイズが可能

HEPA FILTER

HEPA フィルターを搭載し
外部からの埃・細菌・ウイルスを遮断して
清潔な空気で器具を乾燥します

アタッチメント

超音波スケーラーチップ用アクセサリ
(最大 8 本対応) など豊富なアタッチメントを
用いて様々な形態の内腔器具に対応

内腔洗浄

ハンドピースの洗浄にも対応
※ハンドピース単品最大 12 本
※パキウム標準品最大 20 本
※別途買付オプション